

Пожалуйста, прочитайте перед началом работы

Во время установки, у Вас будет возможность конвертировать существующие базы данных в xChekPlus*.

- Существующая база данных должна быть версии xChek* 3.3. Если база данных более ранней версии, обратитесь за помощью в Службу технической поддержки или к торговому представителю.
- Сделайте копию базы данных перед конвертацией в xChekPlus.
- Если база данных большая, ее конвертация может занять несколько часов. Компания IDEXX рекомендует экспортировать результаты последних исследований в базу данных меньшего размера, сначала преобразовать эту базу данных и затем преобразовать более старые данные. Для получения инструкций см. раздел «Преобразование баз данных после установки» на странице 3 настоящего документа.
- Изменились некоторые коды тестов. Чтобы преобразовать эти тесты и связанные с ними данные, необходимо вручную выбрать новый код теста во время преобразования базы данных (см. шаг 11 ниже в разделе «Установка программного обеспечения xChekPlus* из Интернета»). Обратитесь к Руководству пользования программой с сокращенным синтаксисом кодирования для сортировки тестируемых образцов на странице 5 данного документа для получения списка старых и новых кодов.

Внимание: xChekPlus не поддерживает все пользовательские тесты, которые могут иметься в Вашей базе данных. Пожалуйста, обратитесь в Службу технической поддержки или к торговому представителю, если у вас есть вопросы.

Установка программного обеспечения

1. Закройте все другие программы на вашем компьютере.
2. Вставьте компакт-диск с xChekPlus* в дисковод.
3. На рабочем столе Windows* щелкните дважды по значку Мой компьютер/**My Computer** (или Компьютер/**Computer**, в зависимости от версии Windows*).
4. Дважды щелкните ярлык дисковода. Содержимое компакт-диска будет отображено на экране.
5. Дважды щелкните по файлу **Setup.exe**, чтобы запустить мастер установки программы.
6. Перейдите в следующем разделе к **шагу 3**.

Чтобы установить программу xChekPlus* из Интернета:

1. Следуйте инструкциям на сайте **idexx.com/xchekplusdownload** для загрузки файла xChekInstaller.exe на Ваш компьютер.
2. Закройте все другие программы на вашем компьютере, а затем дважды щелкните мышкой по xChekInstaller.exe на вашем компьютере для запуска мастера установки.
3. Следуйте инструкциям мастера установки для инсталляции программы.
 - а. При вопросе о диске и папке, куда нужно будет установить xChekPlus, IDEXX рекомендует установить по умолчанию C:\xChekPlus.
 - б. Когда будет предложено выбрать, кто будет имеет доступ к программе, выбрав пункт **“Все”**. Это разрешит доступ к программе любому зарегистрированному на этом компьютере пользователю. При выборе **“Только я”** позволит только Вам работать с программой.
4. После завершения установки, щелкните дважды значок xChekPlus на рабочем столе или выберите **«Пуск»**, затем **«Программы»**, затем **«xChekPlus»** из панели программ. Откроется окно для ввода пароля.
5. Если вы хотите установить пароль администратора, введите пароль сейчас, подтвердите его, а затем нажмите **ОК**.

Если вы установили пароль администратора, нужно будет вводить пароль, когда вы будете выполнять административные функции, такие как удаление языка или отчета.

Пароли чувствительны к регистру, должны иметь от 4 до 12 символов и могут состоять из цифр и букв.

Примечание: Если вы не хотите активировать пароль, нажмите кнопку **«Отмена»**. Вы можете включить функцию пароля позже, выбрав **«Параметры»**, затем **«Управление системой безопасности»**.

6. В диалоговом окне **«Управление языками»** выберите нужный язык, нажмите кнопку **«Использовать по умолчанию»**, а затем нажмите кнопку **«Закрыть»**.

Примечание: английский является языком по умолчанию во время установки. См. раздел под названием «Добавить новый язык» на странице 4 данного документа, чтобы добавить дополнительные языки и изменить настройки по умолчанию.

Откроется диалоговое окно «Обновление базы данных». Теперь вы можете обновить существующую базу данных xChekPlus, если это необходимо.

7. Примите решение о необходимости обновления базы данных. Обратите внимание на следующие факторы:
 - a. Конвертация может занять несколько часов, если база данных очень большая. При желании, закройте диалоговое окно Upgrade Database (Обновление базы данных) и обратитесь к разделу «Преобразование баз данных после установки» на странице 3 настоящего документа.
 - b. База данных для обновления должна быть версии xChek 3.3. Если ваша база данных более ранней версии, закройте диалоговое окно Upgrade Database (Обновление базы данных) и свяжитесь со Службой технической поддержки или вашим торговым представителем.
 - v. Если база данных версии xChek 3.3 и вы хотите обновить ее сейчас, то продолжите дальнейшие действия.
8. Если вы хотите перенести шаблоны из версии xChek 3.3 в xChekPlus, убедитесь, что ориентация шаблонов (горизонтальная или вертикальная) одинаковая в обеих базах данных:
 - a. Откройте xChek 3.3, выберите **«Database»**, затем **«Assays»** и затем выберите необходимый тест.
 - b. В окне теста нажмите кнопку **«Basic»** и укажите ориентацию шаблона.
 - v. В xChekPlus закройте диалоговое окно Upgrade Database (Обновление базы данных). Выберите раздел **Database > Assays** (База данных > Анализы), а затем выберите тот же тест, замечая ориентацию.
 - г. Если ориентация шаблона в xChekPlus отличается от ориентации в xChek 3.3, измените ориентацию шаблона в xChekPlus соответственно и закройте диалоговое окно теста.
 - d. Повторите эти действия для всех тестов версии 3.3, которые вы хотите перенести.
 - e. Выберите **«База данных»**, затем **«Конвертировать базу данных xChek»** чтобы открыть диалоговое окно **«Обновить базу данных»**, а затем перейдите к шагу 10 для выполнения обновления базы данных.
9. Если вы **не хотите** переносить шаблоны из версии 3.3 в xChekPlus, вы должны сначала их удалить:
 - a. Откройте xChek 3.3 и выберите **«File»**, а затем **«Template»**.
 - b. Удерживая клавишу CTRL, выберите шаблоны, которые вам не нужны, и затем нажмите кнопку **Delete** (Удалить).
 - v. Перейдите к **шагу 10** для проведения обновления базы данных.
10. Нажмите кнопку **«Обзор»**, найдите базу данных, которую вы хотите обновить, и нажмите кнопку **«Открыть»**.

В окне «Статус обновления», красные кружки с X показывают тесты, которые должны быть вручную переведены на новые коды тестов (см. следующий шаг) или были отключены. Зеленые галочки показывают тесты, которые автоматически соответствовали тем же кодам в xChekPlus.
11. Выберите каждый тест, отмеченный красным кругом, который вы хотите преобразовать, и выберите в области Map To (Сопоставляется) код xChekPlus, чтобы связать его с ним. Обратитесь к Руководству пользования программой с сокращенным синтаксисом кодирования для сортировки тестируемых образцов на странице 5 данного документа, для получения списка старых и новых кодов.

Внимание: Если нет теста для сопоставления, то данный тест не будет перенесен в xChekPlus и останется в базе данных xChek 3.3. Внимание: xChekPlus не поддерживает все пользовательские тесты, которые могут иметься в Вашей базе данных. Пожалуйста, обратитесь в Службу технической поддержки или к торговому представителю, если у вас есть вопросы.
12. После того как вы присвоили все возможные обозначения тестам, нажмите кнопку **«Разрешить»**. В окне статуса обновления будет вопрос: хотите ли вы импортировать данные в текущую базу данных.
13. Нажмите кнопку **«Да»**. Начнется обновление, статус которого будет отображаться в окне.

Или

Нажмите кнопку **«Нет»**, чтобы выбрать другую базу данных или импортировать в новую пустую базу данных. При импорте в новую базу данных, введите имя новой базы данных в окне **«Имя файла»** и нажмите кнопку **«Сохранить»**. Обновление начнется, затем появится сообщение, когда обновление завершится.

14. Когда все обновления будут закончены, проверьте и убедитесь, что все данные были преобразованы. Например, проверьте следующее:
 - Справочные данные (ветеринар, владелец, и т.д.)
 - Базовые значения
 - Структура названия

Внимание: Обратитесь за помощью в Службу технической поддержки или к вашему торговому представителю, если отсутствуют какие-либо данные.

Обратитесь в Службу технической поддержки, если какие-нибудь данные будут отсутствовать.

Настройка ридера и составление отчета:

1. Выберите **«Файл»**, затем **«Настройки ридера»** в строке меню, чтобы открыть диалоговое окно параметров ридеров.
2. Выберите Ваш ридер из списка.
3. Если это ридер с последовательным входом, настройте оборудование соответственно и убедитесь, что порт **«COM»** является тем, который вы выбрали при подключении ридера (исправьте это при необходимости).

Примечание: Новые USB ридеры не показывают детали настроек.

4. Нажмите кнопку **«По умолчанию»**, чтобы использовать Ваш ридер автоматически.
5. Нажмите кнопку **«Сохранить»**, а затем **«Заккрыть»**.
6. В меню xChekPlus выберите пункт **«Параметры»**, затем **«Конфигурация отчета»**, чтобы открыть диалоговое окно **«Управление конфигурацией отчета»**.
7. В заголовке отчета введите информацию в три окна и загрузите логотип, если это необходимо. Нажмите клавишу **F1** для получения информации о загрузке логотипа или обратитесь к справочной онлайн системе xChekPlus в рамках программного обеспечения для получения дополнительной информации по загрузке логотипа.

Пожалуйста, обратитесь к справочной системе xChekPlus в рамках программного обеспечения для получения дополнительной информации о загрузке логотипа.

8. Нажмите кнопку **«Сохранить»**, а затем **«Заккрыть»**.

Преобразование базы данных после установки:

1. Скопируйте все базы данных, которые вы хотите конвертировать, в одну папку, а именно:
 - а. Создайте папку на вашем жестком диске, и назовите его "Базы данных для преобразования" или нечто подобное.
 - б. Щелкните правой кнопкой мыши по файлу базы данных, который требуется преобразовать, и выберите команду **«Копировать»**.
 - в. Щелкните правой кнопкой мыши папку "Базы данных для преобразования" и выберите **«Вставить»**.
 - г. Повторите операцию для каждой базы данных, которую требуется преобразовать.
2. Войдите в xChekPlus.
3. Выберите **«База данных»**, затем **«Конвертировать базу данных xChek»**.
4. Выполните шаги 10-14 в соответствии с разделом **«Для установки программного обеспечения xChekPlus* из Интернета»** на странице 1 данного документа, чтобы преобразовать базу данных.

Добавление нового языка

Языком «по умолчанию» для программы xChekPlus является английский. Тем не менее, вы можете добавить новые языки и изменить настройки «по умолчанию» в диалоговом окне «Информация о языке».

Когда поддержка нового языка становится доступной, компания IDEXX предоставит ZIP-файл, содержащий два языковых файла. Выполните следующие действия, чтобы добавить язык в ваше программное обеспечение xChekPlus.

Добавление нового языка:

1. Создайте папку на рабочем столе под названием **xChekPlus — родной язык**.
2. В веб-браузере перейдите на страницу загрузки xChekPlus (idexx.com/xchekplusdownload).
3. Из списка файлов модулей языков выберите нужный язык.
4. При появлении запроса нажмите кнопку **Save As** (Сохранить как) и сохраните файл на рабочем столе.
5. Откройте ZIP-файл, который вы только что загрузили, и скопируйте два файла в домашнюю папку языка **xChekPlus**, созданную вами.
6. В xChekPlus, выберите **Options > Manage Languages** (Параметры > Управление языком) из строки меню. Откроется окно Manage UI Languages (управление языком пользовательского интерфейса).
7. Нажмите кнопку **Add** (Добавить) и введите пароль администратора, при появлении запроса. Пароль не требуется, только если включена функция безопасности. Откроется окно Browse for Folder (Выбор папки).
8. Перейдите на Рабочий стол, выберите домашнюю папку языка **xChekPlus**, а затем нажмите кнопку **OK**. Язык установлен.
9. Нажмите кнопку **OK**, когда вы увидите сообщение «Импорт выполнен успешно» Данный язык теперь отображается в списке языков.
10. Выберите язык из **списка языков**.
11. Нажмите кнопку **Make Default** (Использовать по умолчанию) в разделе Language Details (Сведения о языке) для установки языка по умолчанию. Строка заголовка и название кнопки сразу изменятся на новый язык.
12. Нажмите кнопку **Close** (Закрыть), чтобы закрыть окно Manage UI Languages (Управление языком пользовательского интерфейса).

Руководство по присвоению короткого кода тестам

В таблице ниже в столбце Action Needed (Необходимое действие) обозначаются красным значком X те тесты, которые должны быть сопоставлены с новыми кодами тестов xChekPlus. Необходимо сопоставить только те коды тестов, которые используются в вашей лаборатории. При преобразовании базы данных xChek в xChekPlus перечень тестов, показанный в окне сопоставления, отражает только те тесты, которые присутствуют в обновленной базе данных.

Предыдущий код теста	Название теста	Код теста в xChekPlus	Необходимое действие	Комментарии	Вид животных
AE	IDEXX AE Ab Test	AE	не требуется		Птица
AI	IDEXX AI Ab Test	AI	не требуется		Птица
Alms	IDEXX AI MultiS-Screen Ab Test	Alms	не требуется		Птица
ALV-J	IDEXX ALV-J Ab Test	ALV-J	не требуется		Птица
APP	IDEXX APP-ApxIV Ab Test	APP	не требуется		Свиньи
APP-Apx IV	IDEXX APP-ApxIV Ab Test		не требуется	Отменен	Свиньи
APV	IDEXX APV Ab Test	APV	не требуется		Птица
BabMBUS	<i>Brucella Abortus</i> Milk Bulk (U.S.)		не требуется	Отменен	Рогатый скот
BabM-PQ	IDEXX Brucellosis Milk Ab Test	BrucM	MAP	Изменение кода теста	Рогатый скот
BabMQUS	<i>Brucella Abortus</i> Milk Quarter (U.S.)		не требуется	Отменен	Рогатый скот
BabOUS	<i>Brucella Abortus</i> (OUS)		не требуется	Отменен	Рогатый скот
BabSBOV	<i>Brucella Abortus</i> Serum BOV		не требуется	Отменен	Рогатый скот
BabSI-IP	IDEXX Brucellosis Serum Ab Test	BrucS	MAP	Изменение кода теста	Рогатый скот
BabSP-IP	IDEXX Brucellosis Serum Ab Test	BrucSP	MAP	Изменение кода теста	Рогатый скот
BabSSR	<i>Brucella Abortus</i> Serum SR		не требуется	Отменен	Рогатый скот
BHV1 1–11	IDEXX BHV-1 Bulk Milk Ab Test	BHV1 1–10	MAP	Изменение кода теста	Рогатый скот
BHV1 11–21	IDEXX BHV-1 Bulk Milk Ab Test	BHV1 11–20	MAP	Изменение кода теста	Рогатый скот
BHV1 21–31	IDEXX BHV-1 Bulk Milk Ab Test	BHV1 21–30	MAP	Изменение кода теста	Рогатый скот
BHV1 31–41	IDEXX BHV-1 Bulk Milk Ab Test	BHV1 31–40	MAP	Изменение кода теста	Рогатый скот
BHV1 41–51	IDEXX BHV-1 Bulk Milk Ab Test	BHV1 41–50	MAP	Изменение кода теста	Рогатый скот
BLVMs-PQ	IDEXX Leukosis Milk Screening Ab Test	BLVSM	MAP	Изменение кода теста	Рогатый скот
BLVMv-PQ	IDEXX Leukosis Milk Verification Ab Test	BLVMvM	MAP	Изменение кода теста	Рогатый скот
BLVs	Bovine Leukemia Virus (Screening)		не требуется	Отменен	Рогатый скот
BLVsblk-PQ	IDEXX Leukosis Blocking Ab Test	BLVBlocking	MAP	Изменение кода теста	Рогатый скот
BLVsS-PQ	IDEXX Leukosis Serum Screening Ab Test	BLVsS	MAP	Изменение кода теста	Рогатый скот
BLVv	Bovine Leukemia Virus (Verification)		не требуется	Отменен	Рогатый скот
BLVvON	Bovine Leukemia Virus (Verification) Overnight		не требуется	Отменен	Рогатый скот
Brucovis	IDEXX <i>Brucella ovis</i> Ab Test	Brucovis	не требуется		Рогатый скот
BSE	HerdChek* BSE Ag Test	BSE	не требуется		Рогатый скот
BSEScSR	HerdChek* BSE-Scrapie Ag Test	BSEScrum	MAP	Изменение кода теста	Рогатый скот
BlueT70/80	IDEXX Bluetongue Competition Ab Test	BTV	MAP	Изменение кода теста	Рогатый скот
BVDP80I-IP	IDEXX BVDV p80 Ab Test	BVDApP80S	MAP	Изменение кода теста	Рогатый скот
BVDP80M-IP	IDEXX BVDV p80 Ab Test	BVDApP80M	MAP	Изменение кода теста	Рогатый скот
BVDP80P-IP	IDEXX BVDV p80 Ab Test	BVDApP80SP	MAP	Изменение кода теста	Рогатый скот
BVDvAb	IDEXX BVDV Total Ab Test	BVDvAb	не требуется		Рогатый скот

Предыдущий код теста	Название теста	Код теста в xChekPlus	Необходимое действие	Комментарии	Вид животных
BVDvAbBM	IDEXX BVDV Total Ab Test	BVDvAbBM	не требуется		Рогатый скот
BVDVAgEN	IDEXX BVDV Ag/Serum Plus Test	BVDVAgEN	MAP	Изменение кода теста	Рогатый скот
BVDvAgL	IDEXX BVDV Ag Leukocytes Test	BVDvAgL	не требуется		Рогатый скот
BVDvAgS	IDEXX BVDV Ag/Serum Plus Test	BVDvAgSP	MAP	Изменение кода теста	Рогатый скот
BVDVAgS/EN	IDEXX BVDV Ag Test (U.S.)	BVDvAgSEN	MAP	Изменение кода теста	Рогатый скот
BVDVAgS/ENO	IDEXX BVDV Ag Test (U.S.)	BVDvAgSEN-ON	MAP	Изменение кода теста	Рогатый скот
BVDX2LEN	IDEXX BVDV PI X2 Ag Test	BVDx2LEN	MAP	Изменение кода теста	Рогатый скот
BVDX2SEN	IDEXX BVDV PI X2 Ag Test	BVDx2SEN	MAP	Изменение кода теста	Рогатый скот
CAV	IDEXX CAV Ab Test	CAV	не требуется		Птица
CAV100	IDEXX CAV Ab Test (Vaccination)	CAV100	не требуется		Птица
ChekBrMLPO	IDEXX Brucellosis Milk X2 Ab Test	BrucBM-ON2x	MAP	Изменение кода теста	Рогатый скот
ChekBrMON	IDEXX Brucellosis Milk X2 Ab Test	BrucM-ON 2X	MAP	Изменение кода теста	Рогатый скот
ChekBrMSH	IDEXX Brucellosis Milk X2 Ab Test	BrucM 2X	MAP	Изменение кода теста	Рогатый скот
ChekBrS	IDEXX Brucellosis Serum X2 Ab Test	BrucS 2x	MAP	Изменение кода теста	Рогатый скот
ChekBrSP	IDEXX Brucellosis Serum X2 Ab Test	BrucS-Pool 2x	MAP	Изменение кода теста	Рогатый скот
CHEKITBLV	IDEXX Leukosis Serum X2 Ab Test	BLVs-Ind	MAP	Изменение кода теста	Рогатый скот
CHEKITBLVP	IDEXX Leukosis Serum X2 Ab Test	BLVs-Pool	MAP	Изменение кода теста	Рогатый скот
CHEKIT-NEO	IDEXX <i>Neospora</i> Ab Test	IDEXX NEO	MAP	Изменение кода теста	Рогатый скот
CHEKITTOXO	IDEXX Toxotest Ab Test	Toxo	MAP	Изменение кода теста	Рогатый скот
Chlamydia	IDEXX Chlamydiosis Total Ab Test	Chlamydia	не требуется		Рогатый скот
CSF-Marker	IDEXX CSF Marker Test	CSF-Marker	не требуется		Свиньи
CSF-Sero	IDEXX CSF Sero Ab Test	CSF-Sero	не требуется	В связи с изменениями в данных для расчетов, этот тест не будет конвертироваться в xChekPlus	Свиньи
CSFVAb	IDEXX CSFV Ab Test	CSFVAb	не требуется		Свиньи
CSFVAgS	IDEXX CSFV Ag Serum Test	CSFVag	MAP	Изменение кода теста	Свиньи
CWD	HerdChek* CWD Ag Test	CWD	не требуется		Рогатый скот
EIA	IDEXX cELISA EIA Test	EIA	не требуется		Лошади
EXP	Experimental Protocol		не требуется	Отменен	Птица
FMD-3ABC	IDEXX FMD 3ABC Ab Test	FMD	MAP	Изменение кода теста	Рогатый скот
Hypo	IDEXX Hypodermosis Serum Ab Test	HypoS	MAP	Изменение кода теста	Рогатый скот
HypoMilk	IDEXX Hypodermosis Milk Ab Test	HypoM	MAP	Изменение кода теста	Рогатый скот
IBD	IDEXX IBD Ab Test	IBD	не требуется		Птица
IBD-XR	IDEXX IBD-XR Ab Test	IBD-XR	не требуется		Птица
IBRgB	IDEXX IBR gB X2 Ab Test	IBRgB	не требуется		Рогатый скот
IBRgBpool	IDEXX IBR gB X2 Ab Test	IBRgBpool	не требуется		Рогатый скот
IBRgE	IDEXX IBR gE Ab Test	IBRgE	не требуется		Рогатый скот
IBRgEM	IDEXX IBR gE Ab Test	IBRgEM	не требуется		Рогатый скот
IBRInd	IDEXX IBR Individual Ab Test	IBRInd	не требуется		Рогатый скот
IBRpool	IDEXX IBR Pool Ab Test	IBRpool	не требуется		Рогатый скот
IBRs	Infectious Bovine Rhinotracheitis Virus (Screening)		не требуется	Отменен	Рогатый скот
IBRTnkM	IDEXX IBR Pool Ab Test	IBRTnkM	не требуется		Рогатый скот

Предыдущий код теста	Название теста	Код теста в xChekPlus	Необходимое действие	Комментарии	Вид животных
IBRv	Infectious Bovine Rhinotracheitis Virus (Verification)		не требуется	Отменен	Рогатый скот
IBV	IDEXX IBV Ab Test	IBV	не требуется		Птица
InfAavian	IDEXX Influenza A Ab Test	INFAavian	MAP	Изменение кода теста	Птица
InfAother	IDEXX Influenza A Ab Test	Influenza A	MAP	Изменение кода теста	Свиньи
JohnesAb	Johne's Antibody		не требуется	Отменен	Рогатый скот
LLAB	IDEXX ALV Ab Test	LLAB	не требуется		Птица
LLAG	IDEXX ALV Ag Test	LLAG	не требуется		Птица
Mbovis	IDEXX <i>M. bovis</i> Ab Test	MBovis	MAP	Изменение кода теста	Рогатый скот
MG	IDEXX MG Ab Test	MG	не требуется		Птица
MGSR	<i>Mycoplasma gallisepticum</i> SR		не требуется	Отменен	Птица
Mhyo	IDEXX <i>M. hyo.</i> Ab Test	Mhyo	не требуется		Свиньи
MMt	IDEXX MM Ab Test	MMt	не требуется		Птица
MMtSR	<i>Mycoplasma meleagridis</i> SR		не требуется	Отменен	Птица
MptabSC	<i>Mycobacterium paratuberculosis</i> Antibody SC		не требуется	Отменен	Рогатый скот
MptAbSR	<i>Mycobacterium paratuberculosis</i> Antibody SR		не требуется	Отменен	Рогатый скот
MptMUS	IDEXX MAP Ab Test	MptMUS	не требуется		Рогатый скот
MptsMOUS	IDEXX Paratuberculosis Screening Ab Test	MptsMOUS	не требуется		Рогатый скот
MptSPUS	IDEXX MAP Ab Test	MptSPUS	не требуется		Рогатый скот
MptsSPOUS	IDEXX Paratuberculosis Screening Ab Test	MptsSPOUS	не требуется		Рогатый скот
MptvMOUS	IDEXX Paratuberculosis Verification Ab Test		не требуется	Отменен	Рогатый скот
MptvSPOUS	IDEXX Paratuberculosis Verification Ab Test		не требуется	Отменен	Рогатый скот
MS	IDEXX MS Ab Test	MS	не требуется		Птица
MSMG	IDEXX MG/MS Ab Test	MSMG	не требуется		Птица
MSSR	<i>Mycoplasma synoviae</i> SR		не требуется	Отменен	Птица
MVCAEVs-PQ	IDEXX MVV/CAEV p28 Ab Screening Test	CAEV/MVVs	MAP	Изменение кода теста	Рогатый скот
MVCAEVv-PQ	IDEXX MVV/CAEV p28 Ab Verification Test	CAEV/MVVv	MAP	Изменение кода теста	Рогатый скот
MVVs	IDEXX CAEV/MVV Total Ab Test— Screening	MVVs	не требуется		Рогатый скот
NDV	IDEXX NDV Ab Test	NDV	не требуется		Птица
NDVt	IDEXX NDV-T Ab Test	NDVt	не требуется		Птица
NEO	IDEXX <i>Neospora</i> X2 Ab Test	IDEXX NEO X2	MAP	Изменение кода теста	Рогатый скот
ORT	IDEXX ORT Ab Test	ORT	не требуется		Птица
PM	IDEXX PM Ab Test	PM	не требуется		Птица
PMt	IDEXX PM-T Ab Test	PMt	не требуется		Птица
Pregnancy	IDEXX Bovine Pregnancy Serum	Pregnancy Serum	MAP	Изменение кода теста	Рогатый скот
PregMilk	IDEXX Bovine Pregnancy Milk	Pregnancy Milk	MAP	Изменение кода теста	Рогатый скот
PRRS	IDEXX PRRS 2XR Ab Test	PRRS	не требуется		Свиньи
PRRS OF	IDEXX PRRS OF Ab Test	PRRS OF	не требуется		Свиньи
PRRS X3	IDEXX PRRS X3 Ab Test	PRRS X3	не требуется		Свиньи
PRVg1	IDEXX PRV/ADV g1 Ab Test	PRVgpl	MAP	Изменение кода теста	Свиньи
PRVgB	IDEXX PRV/ADV gB Ab Test	PRVgB	не требуется		Свиньи

Предыдущий код теста	Название теста	Код теста в xChekPlus	Необходимое действие	Комментарии	Вид животных
PRVgB ON	IDEXX PRV/ADV gB Ab Test	PRVgB ON	не требуется		Свиньи
PRVgB ON%	IDEXX PRV/ADV gB Ab Test		не требуется	Отменен	Свиньи
PRVgB %	IDEXX PRV/ADV gB Ab Test		не требуется	Отменен	Свиньи
PRVgB-fil	IDEXX PRV/ADV gB Ab Test	PRVgB-fil	не требуется		Свиньи
PRVgB-fil%	IDEXX PRV/ADV gB Ab Test		не требуется	Отменен	Свиньи
PRVgp1-fil	IDEXX PRV/ADV gl Ab Test	PRVgpl-fil	не требуется	Отменен	Свиньи
PRVgpl(%)	IDEXX PRV/ADV gl Ab Test	PRVgpl(%)	не требуется		Свиньи
PRVs	Pseudorabies Virus (screening)		не требуется	Отменен	Свиньи
PRVv	Pseudorabies Virus (verification)		не требуется	Отменен	Свиньи
Q Fever	IDEXX Q Fever Ab Test	Q-Fever	MAP	Изменение кода теста	Рогатый скот
REO	IDEXX REO Ab Test	REO	не требуется		Птица
REV	IDEXX REV Ab Test	REV	не требуется		Птица
Salm10%	IDEXX Свиньи <i>Salmonella</i> Ab Test	Salm 10%	MAP	Изменение кода теста	Свиньи
Salm 15%	IDEXX Свиньи <i>Salmonella</i> Ab Test	Salm 15%	не требуется		Свиньи
Salm 20%30	IDEXX Свиньи <i>Salmonella</i> Ab Test	Salm 20%30	не требуется		Свиньи
Salm 20%ON	IDEXX Свиньи <i>Salmonella</i> Ab Test	Salm 20%ON	не требуется		Свиньи
Salm 40%30	IDEXX Свиньи <i>Salmonella</i> Ab Test	Salm 40%30	не требуется		Свиньи
Salm 40%ON	IDEXX Свиньи <i>Salmonella</i> Ab Test	Salm 40%ON	не требуется		Свиньи
Scrapie	HerdChek* Scrapie Ag Test	Scrapie	не требуется		Рогатый скот
SE	IDEXX SE Ab Test	SE	не требуется		Птица
SIV H1N1	IDEXX SIV H1N1 Ab Test	SIV H1N1	не требуется		Свиньи
SIV H3N2	IDEXX SIV H3N2 Ab Test	SIV H3N2	не требуется		Свиньи
TRCHIS	IDEXX Trachitest Serum Screening Ab Test	TRCHIS	MAP	Изменение кода теста	Рогатый скот
TRCHISP	IDEXX Trachitest Serum Screening Ab Test	TRCHIS-Pool	MAP	Изменение кода теста	Рогатый скот
Trich	IDEXX Trichinellosis Ab Test	Trichen	MAP	Изменение кода теста	Свиньи
TrichWB	IDEXX Trichinellosis Ab Test		не требуется	Отменен	Свиньи
TRT	Avian Rhinotracheitis		не требуется	Отменен	Птица
TRTSV	Avian Rhinotracheitis Svanovir		не требуется	Отменен	Птица
	IDEXX AI H5 Ab Test	AI H5	не требуется	Новый	Птица
	IDEXX Brucellosis Ovine/Caprine Ab Test	Brucovin/cap	не требуется	Новый	Рогатый скот
	IDEXX <i>Cryptosporidium</i> Ag Test	Crypto	не требуется	Новый	Рогатый скот
	IDEXX Rota-Corona-K99 Ag Test	RotaCor	не требуется	Новый	Рогатый скот
	IDEXX CAEV/MVW Total Ab Test— Screening	CAEVs	не требуется	Новый	Рогатый скот
	IDEXX CAEV/MVW Total Ab Test— Verification	CAEVv	не требуется	Новый	Рогатый скот
	IDEXX CAEV/MVW Total Ab Test— Verification	MVVv	не требуется	Новый	Рогатый скот
	IDEXX Chlamydiosis Verification Test	ChlamVC	не требуется	Новый	Рогатый скот
	IDEXX Chlamydiosis Verification Test	ChlamVSR	не требуется	Новый	Рогатый скот
	IDEXX IBR gB Blocking Ab Test	IBRgB B	не требуется	Новый	Рогатый скот
	IDEXX Trachitest Serum Verification Ab Test	TRCHlv	не требуется	Новый	Рогатый скот
	IDEXX Trachitest Serum Verification Ab Test	TRCHlv-Pool	не требуется	Новый	Рогатый скот

Предыдущий код теста	Название теста	Код теста в xChekPlus	Необходимое действие	Комментарии	Вид животных
	IDEXX <i>M. agalactiae</i> Screening Ab Test	MagSS	не требуется	Новый	Рогатый скот
	IDEXX <i>M. agalactiae</i> Verification Ab Test	MagSV	не требуется	Новый	Рогатый скот
	HerdChek* BSE-Scrapie Ag Test	BSESBoV	не требуется	Новый	Рогатый скот
	IDEXX Schmallenberg Ab Test	SBV	не требуется	Новый	Рогатый скот